

Desinfetante Hospitalar de Nível Intermediário

Master Guardian

+ HEALTH CARE

MASTER GUARDIAN é um limpador e desinfetante hospitalar de nível intermediário, formulado à base de Biguanida e Quaternário de Amônia de 5ª geração. MASTER GUARDIAN tem atividade microbiana de amplo espectro, mesmo utilizado em águas duras e em presença de matéria orgânica. O produto possui ação residual e alto poder de limpeza. Por ser um 2 em 1, limpador e desinfetante, economiza tempo e torna o custo final de limpeza e desinfecção mais baixo. As soluções de uso do produto tem estabilidade comprovada por laudo de até 30 dias, o que evita perdas. MASTER GUARDIAN, tem pH neutro, o que permite sua utilização nos mais diversos tipos de pisos e superfícies, sem agressão às mesmas, além de ser seguro para os usuários.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Aparência: Líquido Viscoso

Cor: Verde

Odor: Característico de Quaternário

pH puro: 6,0 - 8,0 pH Sol. 1%: 6,0 - 8,0

COMPOSIÇÃO

Ativos, Tensoativos Não Iônicos, Corantes e Veículos.

Princípios ativos: Cloridrato de Polihexametilenobiguanida: (3,0% p/p), Mistura de Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio e Cloreto de Didecil Dimetil Amônio (20% p/p).

FINALIDADE

MASTER GUARDIAN é um limpador desinfetante de nível intermediário para uso em estabelecimentos ligados assistência à saúde como, hospitais, clínicas médicas e odontológicas, laboratórios, etc. MASTER GUARDIAN é especialmente recomendado para a limpeza e desinfecção de pisos, paredes, tetos, divisórias, móveis, louças sanitárias e demais superfícies, nas limpezas terminais e concorrentes.

MODO DE USAR

Superfícies Fixas: Aplicar a solução diluída a 1:200 (5 ml para 1 litro de água) com pulverizadores, mop ou pano. Deixar agir por 10 minutos e enxaguar se necessário.

Artigos e Acessórios Não Críticos: Após a limpeza e secagem dos artigos e/ou acessórios, colocá-los por imersão na solução diluída a 1:200 (5 ml para 1 litro de água) por 10 minutos. Enxaguar e secar.

Para Desinfecção de Nível Intermediário: Lavar, enxaguar e secar os artigos de inaloterapia e assistência ventilatória. Imergir os artigos na solução 1:50 (20 ml por litro de água), deixando em contato por 30 minutos. Enxaguar e secar.

ATIVIDADE ANTIMICROBIANA

Microorganismo	Diluição	Tempo de Contato
Escherichia Coli	1:200	10 Minutos
Pseudomonas Aeruginosa	1:200	10 Minutos
Salmonella Choleraesuis	1:200	10 Minutos
Staphylococcus Aureus	1:200	10 Minutos
Mycobacterium Smegmatis	1:50	10 Minutos
Candida Albicans	1:50	10 Minutos
Superbactéria - KPC	1:50	10 Minutos
Aspergillus Brasiliense	1:50	10 Minutos
Tricophyton Mentagrophytes	1:50	30 Minutos
Mycobacterium Bovis	1:50	30 Minutos
Acinetobacter Baumannii	1:50	1 Minuto
Enterococcus Hirae	1:50	1 Minuto
Staphylococcus Aureus MRSA	1:50	1 Minuto
Aspergillus Brasiliensis	1:50	10 Minutos

ECOMASTER
POR UM MUNDO MAIS LIMPO



FICHA TÉCNICA

PRECAUÇÕES DE USO

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância. Se ingerido, consulte de imediato o Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde mais próximo. Evite o contato com a pele e os olhos. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Caso necessite de informações adicionais entre em contato com o Centro Toxicológico pelo telefone 0800 - 0148110. Não reutilizar a embalagem vazia.

EMBALAGEM

Bombona plástica 5 litros, Frasco de 1 litro com dosador.

CONSERVAÇÃO

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada. Recomenda-se que seja armazenado em ambiente coberto e seco. Devem ser evitadas temperaturas extremas. **NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA INDICADO PELO FABRICANTE POR ESCRITO.**

ECOMASTER QUÍMICA IND. E COM. LTDA
RUA JOAQUIM THOMAZ DA SILVA, 521
BAIRRO JARDIM MARACANÃ
UBERABA MG CEP 38041 097
(34) 3311 2005 WWW.ECOMASTER.IND.BR
ecomaster@ecomaster.ind.br
CNPJ - 05.642.412/0001-49
NºAut. MS - 3.04.145-2
PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA M/S Nº - 341450066