

Desinfetante hospitalar para superfícies  
fixas e artigos não críticos

# Master OxyQuat Health

## Exclusivo Sistema Easy 2 Dose:

- Simples de instalar e fácil de usar;
- Seguro, embalagem inviolável.
- Elimina erros de diluição. Já vem com a diluição pré definida;
- Dispensa manutenção.



## + HEALTH CARE

**MASTER OXYQUAT HEALTH** é um limpador e desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos à base de Peróxido de Hidrogênio aliado ao Quaternário de Amônio de 5ª geração. Sua formulação tem atividade anti-microbiana de amplo espectro e é efetivo mesmo em presença de matéria orgânica. O produto possui ação residual. Por ser um 2 em 1, limpador e desinfetante, agiliza o processo de limpeza.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Aparência: Líquido, móvel  
Cor: Amarelo claro  
Odor: Característico  
pH (puro): 1,0 – 2,0  
pH (Sol. 1%): 3,0 – 4,0  
Densidade (25 °C): 1,010 – 1,030 g/mL

## COMPOSIÇÃO

Ingredientes Ativos, Antiespumante, Estabilizante, Sequestrante, Tensoativo Não Iônico e Água.

Princípios Ativos: Peróxido de Hidrogênio, 6,0% p/p  
Quaternário de Amônio, 5. Geração, 8,0% p/p

## FINALIDADE

**MASTER OXYQUAT HEALTH** é um limpador desinfetante à base de peróxido de hidrogênio e quaternário de amônio, indicado para ambientes hospitalares e estabelecimentos relacionados à assistência à saúde. **MASTER OXYQUAT HEALTH** é indicado para limpeza e desinfecção de superfícies fixas em geral e artigos hospitalares não críticos. **MASTER OXYQUAT HEALTH** limpa, e desinfeta em uma única operação.

## MODO DE USAR

### Limpeza e desinfecção de superfícies: Diluição 1:119



**Aperte o Botão Verde:** Acionar o sistema e encher o recipiente com a solução do produto. Aplicar a solução sobre a superfície a ser limpa e desinfetada, deixar agir por 5 minutos. Deixar secar ou enxaguar se necessário.

### Limpeza e eliminação de Cándida Albicans e Mycobacterium Bovis: Diluição 1:25



**Aperte o Botão Azul:** Acionar o sistema e encher o recipiente com a solução do produto. Aplicar a solução sobre a superfície ou artigo a ser limpo e desinfetado, deixar agir por:  
- 5 minutos para eliminar Candida Albicans  
- 30 minutos para eliminar Mycobacterium Bovis

## ATIVIDADE ANTIMICROBIANA

MICROORGANISMO	DILUIÇÃO	TEMPO Minutos
Escherichia Coli	1:119	5
Pseudomonas Aeruginosa	1:119	5
Salmonella Choleraesuis	1:119	5
Staphylococcus Aureus	1:119	5
Enterococcus Hirae	1:119	5
Candida Albicans	1:50	5
Mycobacterium Bovis	1:25	30

**ECOMASTER**  
POR UM MUNDO MAIS LIMPO



## FICHA TÉCNICA

## PRECAUÇÕES DE USO

**CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância. Se ingerido, consulte de imediato o Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde mais próximo. Evite o contato com a pele e os olhos. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Caso necessite de informações adicionais entre em contato com o Centro Toxicológico pelo telefone 0800 - 0148110. Não reutilizar a embalagem vazia.

## EMBALAGEM

Embalagem Easy 2 Dose 5 litros.

## CONSERVAÇÃO

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada. Recomenda-se que seja armazenado em ambiente coberto e seco. Devem ser evitadas temperaturas extremas. **NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA INDICADO PELO FABRICANTE POR ESCRITO.**

Válido por 24 meses a partir da data de fabricação.

ECOMASTER QUÍMICA IND. E COM. LTDA  
RUA JOAQUIM THOMAZ DA SILVA, 521  
BAIRRO JARDIM MARACANÃ  
UBERABA/MG CEP: 38041 097  
(34) 3311 2005 [WWW.ECOMASTER.IND.BR](http://WWW.ECOMASTER.IND.BR)  
[ecomaster@ecomaster.ind.br](mailto:ecomaster@ecomaster.ind.br)

CNPJ - 05.642.412/0001-49  
NºAut. MS - 3.04.145-2  
PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA M/S Nº - 341450083