

Desinfetante hospitalar para superfícies
fixas e artigos não críticos

Master OxyQuat Health

+ HEALTH CARE

MASTER OXYQUAT HEALTH é um limpador e desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos à base de Peróxido de Hidrogênio aliado ao Quaternário de Amônio de 5ª geração. Sua formulação tem atividade anti-microbiana de amplo espectro e é efetivo mesmo em presença de matéria orgânica. O produto possui ação residual. Por ser um 2 em 1, limpador e desinfetante, agiliza o processo de limpeza.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Aparência: Líquido, móvel
Cor: Amarelo claro
Odor: Característico
pH (puro): 1,0 – 2,0
pH (Sol. 1%): 3,0 – 4,0
Densidade (25 °C): 1,010 – 1,030 g/mL

COMPOSIÇÃO

Ingredientes Ativos, Antiespumante, Estabilizante, Sequestrante, Tensoativo Não Iônico e Água.

Princípios Ativos: Peróxido de Hidrogênio, 6,0% p/p
Quaternário de Amônio, 5.ª Geração, 8,0% p/p

FINALIDADE

MASTER OXYQUAT HEALTH é um limpador desinfetante à base de peróxido de hidrogênio e quaternário de amônio, indicado para ambientes hospitalares e estabelecimentos relacionados à assistência à saúde. **MASTER OXYQUAT HEALTH** é indicado para limpeza e desinfecção de superfícies fixas em geral e artigos hospitalares não críticos. **MASTER OXYQUAT HEALTH** limpa, e desinfeta em uma única operação.

MODO DE USAR

Preparar solução a 0,83%, ou seja, diluir 1 parte de Master OxyQuat Health em 119 partes de água.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS: Aplicar a solução nas superfícies a serem limpas e desinfetadas, deixar agir por 5 minutos. Deixar secar ou enxaguar e secar se necessário.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE ARTIGOS NÃO CRÍTICOS: Aplicar a solução nas superfícies dos artigos, ou coloca-los por imersão na solução, deixar agir por 5 minutos. enxaguar e secar.

ATIVIDADE ANTIMICROBIANA

MICROORGANISMO	DILUIÇÃO	TEMPO Minutos
Escherichia Coli	1:119	5
Pseudomonas Aeruginosa	1:119	5
Salmonella Choleraesuis	1:119	5
Staphylococcus Aureus	1:119	5
Enterococcus Hirae	1:119	5
Candida Albicans	1:50	5
Mycobacterium Bovis	1:25	30

ECOMASTER
POR UM MUNDO MAIS LIMPO



FICHA TÉCNICA

PRECAUÇÕES DE USO

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância. Se ingerido, consulte de imediato o Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde mais próximo. Evite o contato com a pele e os olhos. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Caso necessite de informações adicionais entre em contato com o Centro Toxicológico pelo telefone 0800 - 0148110. Não reutilizar a embalagem vazia.

EMBALAGEM

Bombona plástica de 5 litros.

CONSERVAÇÃO

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada. Recomenda-se que seja armazenado em ambiente coberto e seco. Devem ser evitadas temperaturas extremas. **NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA INDICADO PELO FABRICANTE POR ESCRITO.**

Válido por 24 meses a partir da data de fabricação.

ECOMASTER QUÍMICA IND. E COM. LTDA
RUA JOAQUIM THOMAZ DA SILVA, 521
BAIRRO JARDIM MARACANÃ
UBERABA/MG CEP: 38041 097
(34) 3311 2005 WWW.ECOMASTER.IND.BR
ecomaster@ecomaster.ind.br

CNPJ - 05.642.412/0001-49

NºAut. MS - 3.04.145-2

PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA M/S Nº - 341450083